

SECTION 01

SELF-LIGATING BRACKET SYSTEM

セルフライゲーティング ブラケット システム

CLIPPY-C/CLIPPY MicroMini RC/mini CLIPPY/CLIPPY-L

CLIPPY®

【クリッピー】

より使いやすく、
より美しく

それがTOMYセルフライゲーティング
ブラケット“クリッピー”です。

CLIPPY-C
CLIPPY-C 2G
クリッピー-C / クリッピー-C 2G




CLIPPY MicroMini RC
クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング



mini CLIPPY
ミニクリッピー



CLIPPY-L
クリッピー-L

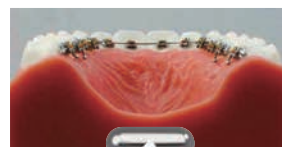

より美しい歯列矯正の実現へ

クリッピーには、ナチュラルな白さが際立つセラミックブラケット、小さくてすっきりした印象のメタルブラケット、リングブラケットなど、様々なご要望に対応しています。

歯牙移動を柔軟にコントロール

クリッピーの大きな特長は、治療の各段階に合わせて、適切なワイヤーやブラケットの固定度合いを選べることです。歯牙移動を柔軟にコントロールして、より短い時間で治療効果を上げるとともに、患者さんの負担も軽減します。

ワイヤー交換も簡単でスムーズ

開閉が容易なクリップを採用したことにより、ワイヤー交換が簡単でスムーズに行えます。また、リガチャーワイヤーやモジュールなどを用いずに結紮できるので、オーラルハイジーンのケアが行いやすいことと、医療廃棄物を減らすことができるのもメリットです。

充実したメカニズム

ボンディング材を選ばないメカニカルロックベース、正面とジンジバル方向から開閉ができるロジウムコーティング*された開閉クリップなど、トミーテクノロジーを駆使したメカニズムを採用しています。

*クリッピー-Cに採用

クリッピーの特性 CLIPPY Series for labial^{※1}

ストレートワイヤーテクニックの治療結果を評価する基準として、Dr.アンドリュースの「シックス キー」つまり6つの鍵が提唱されています。その6つの鍵を達成する方法として、スペーシング、アンギュレーション、インクリネーション、ローテーションコントロールなどの調整にある程度の力を加えることが必要とされています。それを可能にしたセルフライゲティングブラケットがクリッピーです。ワイヤーを交換することにより、治療初期から後期まで、必要に応じた矯正力・コントロールを選択することが可能で、従来の結紮作業を伴った治療効果と同様な結果を得ることができます。

3つのステージ CLIPPY Series for labial^{※1}

クリッピーは、ワイヤーとブラケットの固定度合いにより「パッシブ」「インタラクティブ」「アクティブ」の3つのステージに分類されます。治療初期から後期まで、それぞれの段階に応じたステージを選ぶことで、適切な治療を行うことができます。

1 パッシブステージ


ラウンドワイヤーが自由にスライドし、ワイヤーの特性を十分に発揮することができます。弱い矯正力で歯牙のレベリングやアライメントが可能です。

2 インタラクティブステージ

スクエアワイヤーがクリップに触れることなくスロット内に収まるため、ある程度のトルク及びローテーションコントロールが可能です。スムーズに歯牙移動を行うことができます。前歯のリトラクションには適切なステージです。

3 アクティブステージ

レクタングラーワイヤーが完全にクリップで固定されるため、十分なアクティブコントロールが可能です。ブラケットのプリスクリプションが発揮されます。

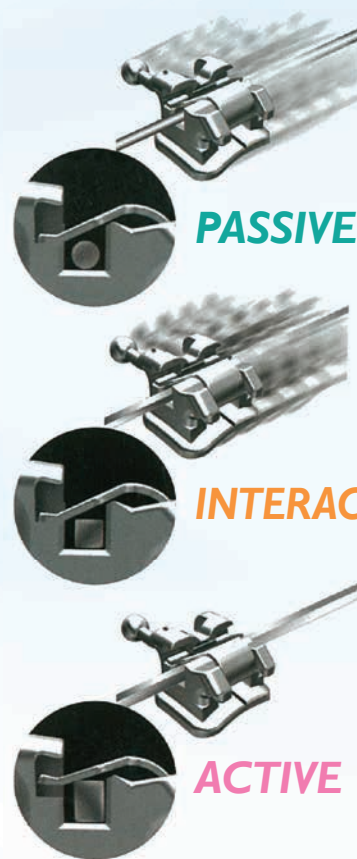

| Slot Sizes | Archwire Sizes | | |
|------------|-----------------------------|-------------|---|
| | PASSIVE | INTERACTIVE | ACTIVE |
| .018"Slot | .014 .016 .016 × .016 | .018 × .018 | .016 × .022 .017 × .025 .018 × .025 |
| .022"Slot | .016 .018 .018 × .018 | .020 × .020 | .018 × .025 .019 × .025 .021 × .028 ^{※2} |

※1 クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティングの小白歯は、パッシブ仕様となります。

※2 クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティングは.021×.025となります。

CLIPPY-C

クリッピーC セラミックセルフライゲージング ブラケット



ロジウムコーティングされたクリップは、審美性を高めます。また治療期間を通じてブラッシングで剥がれたり、食物色素で着色することがありません。耐久性にすぐれたコーティングです。そしてこの独自のクリップ形状は、ブラケット正面からの開閉を可能にし、ワイヤー交換が容易に行えます。



リベットロック* (Rivet-Lock) ベースは、ボンディング材を選ばずにご使用いただけます。
*メカニカルロックベース



CIM (Ceramic Injection Molding) 製法によって、ブラケットの表面は滑らかにかつ精密に製造されています。また、HIP (高温高圧処理) の採用により、ブラケットの強度及び透光性を高めました。

CLIPPY Micro Mini RC

クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング セルフライゲージング ブラケット




ロジウムコーティング施工
メタルブラケットでありながら、高い審美性を実現しました。
ロープロファイル&コンパクト設計
ミニクリッピーのコンパクトさをさらに小型化
小白歯 パッシブ仕様

mini CLIPPY

ミニクリッピー セルフライゲージング ブラケット

ミニクリッピーは、その独自の構造と操作性でさまざまなメリットをもたらします。

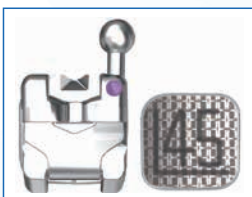

部位の識別が簡単
IDマーキングとベース面のレーザーマーキングにより、部位の識別が簡単にできます。




- インターブラケットスパンが広くなり、重度の叢生にもワイヤーを装着することが可能です。
- 装着時における違和感を軽減します。

CLIPPY TUBES

クリッピーチューブ セルフライゲティング バッカルチューブ




クリッピーシリーズに採用しているクリップ機構を継承し、6番大白歯用に開発されました。他のクリッピーと同様に、ワイヤー交換をきわめて容易に行うことが可能です。

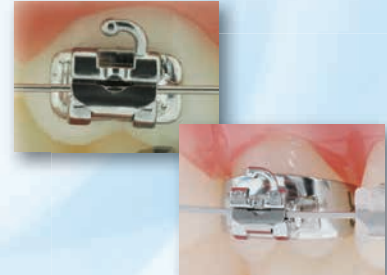

クリップの開閉方法

OPEN

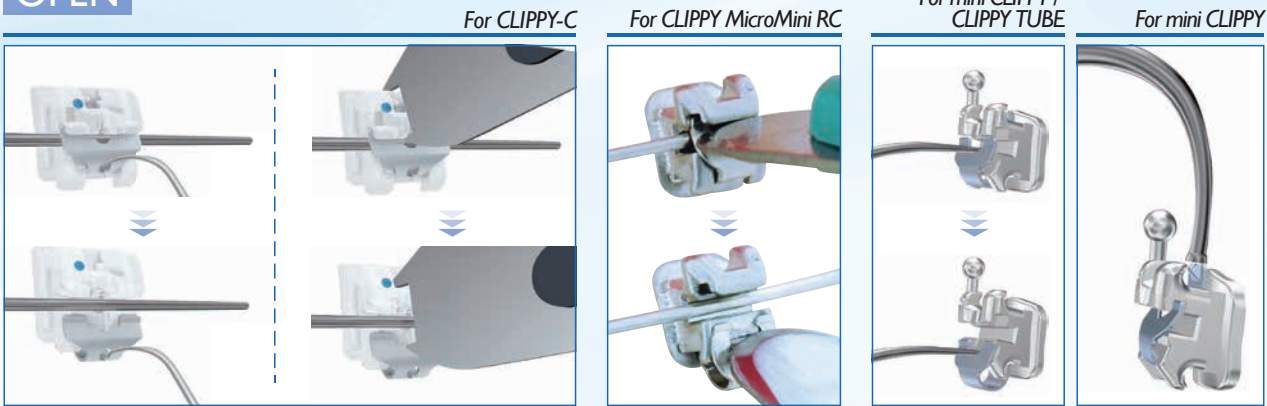

オープニングホール

お手持ちの探針(No.9推奨)で、クリップのオープニングホールを用いて開けられます。



813-1060

クリップオープナー
(クリッピーC専用ツール)


販売名：クリップオープナー
一般名称：歯科矯正用結さつ器
届出番号：13B2X10162590700 一般医療機器



813-1080

クリップオープナー
(クリッピーマイクロミニRC専用)

販売名：クリップオープナー
一般名称：歯科矯正用結さつ器
届出番号：13B2X10162590700 一般医療機器

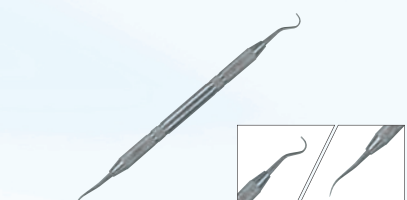


813-1050

オープニングツール
(Vツール)

販売名：オープニングツール (Vツール)
一般名称：歯科矯正用結さつ器
届出番号：11B3X00012000049 一般医療機器

CLOSE

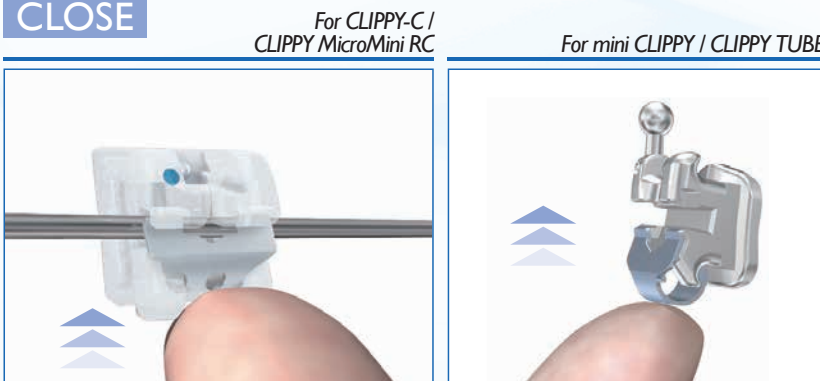

指でクリップをスライドさせて閉める

ディボンディング インストルメント



Invented by Dr. Masashi Saito

802-1008

ワンダーリムーバー

販売名：ワンダーリムーバー
一般名称：歯科矯正用プライヤ
届出番号：11B1X1000639D114 一般医療機器

LIPPY-C
APPLIANCES販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器OPA-K Maxillary Arch
クリッピー C OPA-K 上顎

OPA-K用に開発されたクリッピーC。
日本人のためのアプライアンスをセルフライゲーティングで実現しました。
OPA-Kの特長を受け継ぎ、形状をよりコンパクトに抑えています。
下顎小臼歯もラインナップされた、上下顎5-5でご用意しております。



| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/ Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|
| Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1 | 12° | 3° | 0° | 3.2 | L R | 1686-101L 1686-101R | 1686-102L 1686-102R | 10個/ PK | |
| Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2 | 8° | 6° | 0° | 3.0 | L R | 1686-201L 1686-201R | 1686-202L 1686-202R | | |
| Upper Cuspids 上顎 犬歯 3 3 | -3° | 7° | 0° | 3.2 | L | 1686-301L | 1686-302L | | Hook付き |
| | | | | | R | 1686-301R | 1686-302R | | Hook付き |
| Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小臼歯 4 4 | -3° | 7° | 0° | 3.2 | L | 1686-303L | 1686-304L | | |
| | | | | | R | 1686-303R | 1686-304R | | |
| Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小臼歯 4 4 | -7° | 0° | 0° | 3.2 | L | 1686-401L | 1686-402L | | Hook付き |
| | | | | | R | 1686-401R | 1686-402R | | Hook付き |
| Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小臼歯 4 4 | -7° | 0° | 0° | 3.2 | L&R | 1686-4030 | 1686-4040 | | |
| | | | | | | | | | |
| Upper 2nd Bicuspids 上顎 第2小臼歯 5 5 | -7° | 0° | 0° | 3.2 | L | 1686-501L | 1686-502L | | Hook付き |
| | | | | | R | 1686-501R | 1686-502R | | Hook付き |
| Upper 2nd Bicuspids 上顎 第2小臼歯 5 5 | -7° | 0° | 0° | 3.2 | L&R | 1686-5030 | 1686-5040 | | |
| | | | | | | | | | |
| One Patient Kit 1 症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3 | | | | | | 1686-01 1686-01H | 1686-02 1686-02H | 12個/ KIT | |
| | | | | | | | | | Hook付き |
| 5 ~ 5 5 ~ 5 | | | | | | 1686-001 1686-001HA | 1686-002 1686-002HA | 20個/ KIT | |
| | | | | | | | | | Hook付き |




販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器
 販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21200BZZ00319000 管理医療機器


OPA-K Mandibular Arch

クリッピー C OPA-K 下顎

ブラケット・マーキング色

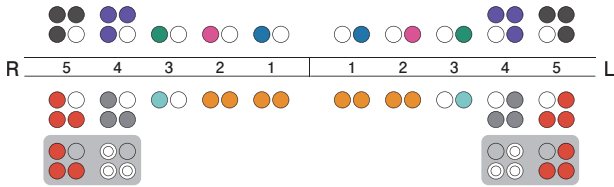

ゲージ識別色

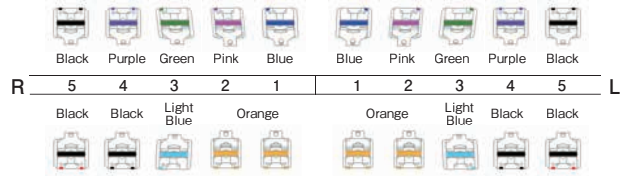

注：ブラケット接着後、サイトゲージを、スケーラー、探針等で取り外してご使用ください。

| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| Lower Anteriors 下顎前歯 2 1 1 2 | 1° | 0° | 0° | 2.8 | L&R | 1686-1110 | 1686-1120 | |
| Lower Cuspids 下顎犬歯 3 3 | -6° | 3° | 0° | 3.2 | L | 1686-311L | 1686-312L | Hook付き |
| | | | | | R | 1686-311R | 1686-312R | Hook付き |
| Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4 4 | -12° | 0° | 0° | 3.2 | L | 1686-411L | 1686-412L | Hook付き |
| | | | | | R | 1686-411R | 1686-412R | Hook付き |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5 5 | -17° | 0° | 0° | 3.2 | L&R | 1686-4130 | 1686-4140 | |
| | | | | | L | 1686-511L | 1686-512L | Hook付き |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5 5 | -17° | 0° | 0° | 3.2 | R | 1686-511R | 1686-512R | Hook付き |
| | | | | | L&R | 1686-5130 | 1686-5140 | |
| Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4 4 mini CLIPPY | -12° | 0° | 0° | 3.0 | L | 956-411L | 956-412L | Post付き |
| | | | | | R | 956-411R | 956-412R | Post付き |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5 5 mini CLIPPY | -17° | 0° | 0° | 3.0 | L&R | 956-4130 | 956-4140 | |
| | | | | | L | 956-511L | 956-512L | Post付き |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5 5 mini CLIPPY | -17° | 0° | 0° | 3.0 | R | 956-511R | 956-512R | Post付き |
| | | | | | L&R | 956-5130 | 956-5140 | |

CLIPPY-C
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器

販売名：セルフライゲーションパッカルチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch

クリッピー C フォーミュラー R(ロスタイプ)上顎



セラミックボディとロジウムコーティングされたクリップを採用したクリッピー C。ナチュラルな白さを口元にもたらし、審美性を重視したセラミックセルフライゲージングブラケットです。




| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/ Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1 1</u> | 12° | 5° | 0° | 3.4 | L R | 168-101L 168-101R | 168-102L 168-102R | |
| Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2 2</u> | 8° | 9° | 0° | 3.2 | L R | 168-201L 168-201R | 168-202L 168-202R | |
| Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3 3</u> | -2° | 13° | 4°M | 3.4 | L | 168-301L | 168-302L | 10個/ PK |
| | | | | | R | 168-301R | 168-302R | |
| Upper 1st & 2nd Bicuspid 上顎 第1、2小臼歯 <u>5 4 4 5</u> | -2° | 13° | 4°M | 3.4 | L | 168-303L | 168-304L | 10個/ PK |
| | | | | | R | 168-303R | 168-304R | |
| Upper 1st & 2nd Bicuspid 上顎 第1、2小臼歯 <u>5 4 4 5</u> | -7° | 0° | 2°D | 3.4 | L | 168-401L | 168-402L | 10個/ PK |
| | | | | | R | 168-401R | 168-402R | |
| Upper 1st Molars CLIPPYTUBE 上顎 第1大臼歯 <u>6 6</u> | -7° | 0° | 2°D | 3.4 | L | 168-403L | 168-404L | 10個/ PK |
| | | | | | R | 168-403R | 168-404R | |
| Upper 1st Molars CLIPPYTUBE 上顎 第1大臼歯 <u>6 6</u> | -10° | 0° | 14°D | 4.0 | L R | (W)952-607L (W)952-607R | (W)952-608L (W)952-608R | 10個/ PK |

CLIPPY-C APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器
 販売名：セルフライゲーションパッカルトューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器


Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch クリッピー C フォーミュラー R(ロスタイプ)下顎

ブラケット・マーキング色

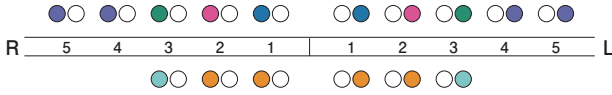



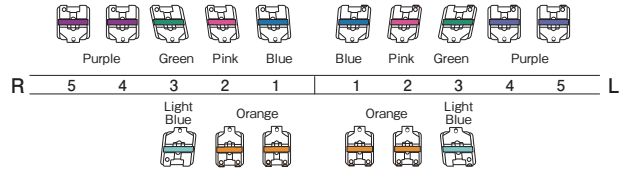


注：左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部のみマーキング。

ゲージ識別色



注：サイトゲージはブラケット接着後、スクーラー、探針等で取り外してご使用ください。

| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 1 2  | -1° | 2° | 0° | 3.0 | L R | 168-111L 168-111R | 168-112L 168-112R | |
| Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3  | -11° | 7° | 2°M | 3.4 | L R | 168-311L 168-311R | 168-312L 168-312R | 10個/ PK Hook付き |
| One Patient Kit 1症例キット 3 3 3 3  | | | | | | 168-01 168-01H | 168-02 168-02H | 12個/ PK Hook付き |
|  | | | | | | 168-05 168-05H | 168-06 168-06H | 16個/ PK Hook付き |
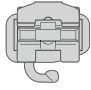
| | | | | | | | | |
|--|------|----|-----|-----|--------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1 大臼歯 6 6  | -25° | 0° | 4°D | 4.0 | L R | (W)952-611L (W)952-611R | (W)952-612L (W)952-612R | 10個/ PK |
|--|------|----|-----|-----|--------|----------------------------|----------------------------|------------|

CLIPPY-C
APPLIANCES 2G

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器

販売名：セルフライゲーションパッカルトューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Formula-M (McLaughlin Type^{*}) Maxillary Arch
 クリッピー C 2G フォーミュラー M(マクロフリンタイプ^{*}) 上顎


クリッピー Cをよりコンパクトに設計した“クリッピーC 2G”
 機能はそのまま継承し、口元の審美性向上と、口腔内の違和感を軽減します。
 スペックはマクロフリンタイプ、上下5-5で用意しております。



| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span. mm | Left/ Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|------------|---------|
| Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1 | 17° | 4° | 0° | 3.2 | L R | 1675-101L 1675-101R | 1675-102L 1675-102R | 10個/ PK | |
| Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2 | 10° | 8° | 0° | 3.0 | L R | 1675-201L 1675-201R | 1675-202L 1675-202R | | |
| Upper Cuspids 上顎 犬歯 3 3 | -7° | 8° | 0° | 3.2 | L R | 1675-301L 1675-301R | 1675-302L 1675-302R | | Hook 付き |
| | 0° | 8° | 0° | 3.2 | L R | 1675-305L 1675-305R | 1675-306L 1675-306R | | Hook 付き |
| Upper 1st & 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小臼歯 5 4 4 5 | -7° | 0° | 0° | 3.2 | L R | 1675-401L 1675-401R | 1675-402L 1675-402R | | Hook 付き |

*Note:

※It does not imply endorsement by doctor.
 ※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。


| | | | | | | | | |
|--|------|----|------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6 6 | -14° | 0° | 10°D | 4.0 | L R | (W)957-607L (W)957-607R | (W)957-608L (W)957-608R | 10個/ PK |
|--|------|----|------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|------------|

CLIPPY-C APPLIANCES 2G

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器
 販売名：セルフライゲーションバックルチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器


Formula-M (McLaughlin Type*) Mandibular Arch クリッピー C 2G フォーミュラー M(マクロフリン タイプ*) 下顎

ブラケット・マーキング色

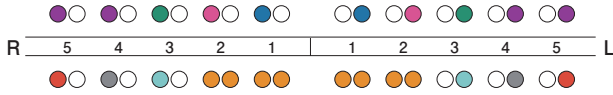

注1：左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部にのみマーキング。
 注2：左右の区別がないブラケットは、歯頸部の近遠心両方にマーキング。

ゲージ識別色

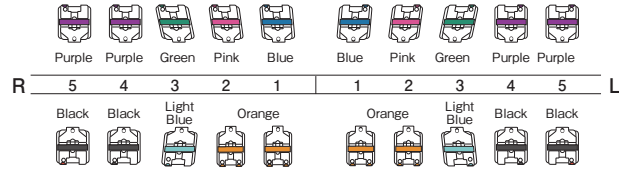

注：ブラケット接着後、サイトゲージを、スケーラー、探針等で取り外してご使用ください。

| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity | | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 1 2 | | -6° | 0° | 0° | 2.8 | L&R | 1675-1110 | 1675-1120 | | |
| | | | | | | L&R | 1675-1130 | 1675-1140 | | |
| Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3 | | -6° | 3° | 0° | 3.2 | L | 1675-311L | 1675-312L | Hook付き | |
| | | | | | | R | 1675-311R | 1675-312R | | |
| | | 0° | 3° | 0° | 3.2 | L | 1675-315L | 1675-316L | Hook付き | |
| | | | | | | R | 1675-315R | 1675-316R | | |
| Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小臼歯 4 4 | | -12° | 2° | 0° | 3.2 | L | 1675-411L | 1675-412L | Hook付き | |
| | | | | | | R | 1675-411R | 1675-412R | | |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小臼歯 5 5 | | -17° | 2° | 0° | 3.2 | L | 1675-511L | 1675-512L | Hook付き | |
| | | | | | | R | 1675-511R | 1675-512R | | |
| One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3 | | 上下顎犬歯トルクなし 下顎前歯トルク付 | | | | | 1675-13H | 1675-14H | Hook付き | 12個/ KIT |
| 5 ~ 5 5 ~ 5 | | 上下顎犬歯トルクなし 下顎前歯トルク付 | | | | | 1675-005HA | 1675-006HA | Hook付き | 20個/ KIT |
| Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1大臼歯 6 6 | | -20° | 0° | 0° | 4.0 | L | (W)957-611L | (W)957-612L | | |
| | | | | | | R | (W)957-611R | (W)957-612R | | 10個/ PK |

CLIPPY-C
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器

販売名：セルフライゲーションバックルチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Formula-M (McLaughlin Type^{*}) Maxillary Arch

クリッピー C フォーミュラー M(マクローフリンタイプ^{*}) 上顎



セラミックボディとロジウムコーティングされたクリップを採用したクリッピー C。ナチュラルな白さを口元にもたらし、審美性を重視したセラミックセルフライゲーティングブラケットです。



| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1 | 17° | 4° | 0° | 3.4 | L R | 1685-101L 1685-101R | 1685-102L 1685-102R | |
| Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2 | 10° | 8° | 0° | 3.2 | L R | 1685-201L 1685-201R | 1685-202L 1685-202R | |
| Upper Cuspids 上顎 犬歯 3 3 | -7° | 8° | 0° | 3.4 | L R | 1685-301L 1685-301R | 1685-302L 1685-302R | Hook付き |
| | 0° | 8° | 2°M | 3.4 | L R | 1685-305L 1685-305R | 1685-306L 1685-306R | Hook付き |
| | 0° | 8° | 2°M | 3.4 | L R | 1685-307L 1685-307R | 1685-308L 1685-308R | Hook付き |
| Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小臼歯 4 4 | -7° | 0° | 0° | 3.4 | L&R L&R | 1685-4010 1685-4030 | 1685-4020 1685-4040 | Hook付き |
| Upper 2nd Bicuspids 上顎 第2小臼歯 5 5 | -7° | 0° | 0° | 3.4 | L&R L&R | 1685-5010 1685-5030 | 1685-5020 1685-5040 | Hook付き |
| Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6 6 | -14° | 0° | 10°D | 4.0 | L R | (W)957-607L (W)957-607R | (W)957-608L (W)957-608R | 10個/ PK |




販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器
 販売名：セルフライゲーションパッカルトUBE
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Formula-M (McLaughlin Type*) Mandibular Arch


クリッピー C フォーミュラー M (マクローフリンタイプ*) 下顎

ブラケット・マーキング色

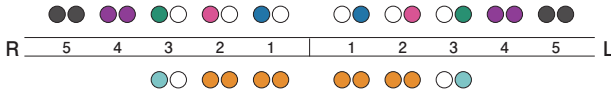

注1：左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部にのみマーキング。
 注2：左右の区別がないブラケットは、歯頸部の近遠心両方にマーキング。

ゲージ識別色

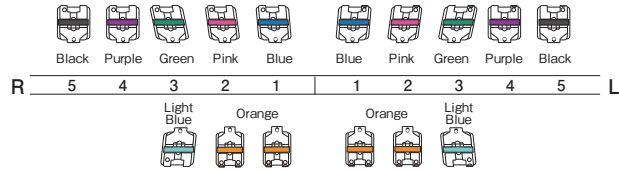

注：ブラケット接着後、サイトゲージを、スケーラー、探針等で取り外してご使用ください。

| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Lower Anteriors 下顎前歯 2 1 1 2 | | -6° | 0° | 0° | 3.0 | L&R | 1685-1110 | 1685-1120 | 10個/ PK | |
| | | 0° | 0° | 0° | 3.0 | L&R | 1685-1130 | 1685-1140 | | |
| Lower Cuspids 下顎犬歯 3 3 | | -6° | 3° | 0° | 3.4 | L | 1685-311L | 1685-312L | | Hook付き |
| | | | | | | R | 1685-311R | 1685-312R | | Hook付き |
| | | 0° | 3° | 0° | 3.4 | L | 1685-315L | 1685-316L | | Hook付き |
| | | | | | | R | 1685-315R | 1685-316R | | Hook付き |
| One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3 | | 上下顎犬歯 下顎前歯 トルク付 | | | | 1685-01H | 1685-02H | Hook付き | | 12個/ KIT |
| 3 ~ 3 3 ~ 3 | | 上下顎犬歯 下顎前歯 トルクなし | | | | 1685-03H | 1685-04H | Hook付き | | 12個/ KIT |
| 5 ~ 5 3 ~ 3 | | 上下顎犬歯 下顎前歯 トルク付 | | | | 1685-05H | 1685-06H | Hook付き | | 16個/ KIT |
| 5 ~ 5 3 ~ 3 | | 上下顎犬歯 下顎前歯 トルクなし | | | | 1685-07H | 1685-08H | Hook付き | | 16個/ KIT |
| Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎第1大臼歯 6 6 | | -20° | 0° | 0° | 4.0 | L | (W)957-611L | (W)957-612L | 10個/ PK | |
| | | | | | R | (W)957-611R | (W)957-612R | | | |

*Note:

※It does not imply endorsement by doctor.
 ※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。

CLIPPY^{MicroMini} RC
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケット S
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：224ADBZX00042000 管理医療機器


販売名：セルフライゲーションバックルチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Clippy MicroMini Rhodium Coating Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch

クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング フォーミュラー-R (ロスタイプ) 上顎



ブラケット全体にロジウムコーティングを施すことによって、
 メタルブラケットでありながら、高い審美性を実現しました。
 また、新たなロープロファイル仕様とコンパクトな形状は、
 装着後の違和感を軽減します。小白歯はすべてパッシブ仕様。
 スペックはDr. Rothのオリジナルでご用意しております。

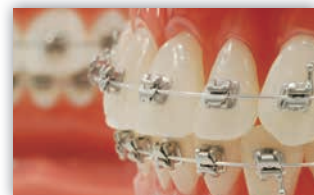


| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span. mm | Left/ Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------|------------|
| Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1 | 12° | 5° | 0° | 2.8 | L R | 9521-101L 9521-101R | 9521-102L 9521-102R | |
| Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2 | 8° | 9° | 0° | 2.6 | L R | 9521-201L 9521-201R | 9521-202L 9521-202R | |
| Upper Cuspids 上顎 犬歯 3 3 | -2° | 13° | 4°M | 2.6 | L | 9521-301L | 9521-302L | Post付き |
| | | | | | R | 9521-301R | 9521-302R | Post付き |
| | -2° | 13° | 4°M | 2.6 | L | 9521-303L | 9521-304L | |
| | | | | | R | 9521-303R | 9521-304R | |
| | -2° | 9° | 4°M | 2.6 | L | 9521-305L | 9521-306L | Post付き |
| | | | | | R | 9521-305R | 9521-306R | Post付き |
| -2° | 9° | 4°M | 2.6 | L | 9521-307L | 9521-308L | | |
| | | | | R | 9521-307R | 9521-308R | | |
| Upper 1st, 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小白歯 5 4 4 5 PASSIVE仕様 | -7° | 0° | 2°D | 2.6 | L | 9521-P401L | 9521-P402L | Post付き |
| | | | | | R | 9521-P401R | 9521-P402R | Post付き |
| | -7° | 0° | 2°D | 2.6 | L | 9521-P403L | 9521-P404L | |
| | | | | | R | 9521-P403R | 9521-P404R | |
| Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大白歯 6 6 | -10° | 0° | 14°D | 4.0 | L | (W)952-607L | (W)952-608L | 10個/ PK |
| | | | | | R | (W)952-607R | (W)952-608R | |

CLIPPY^{MicroMini} RC APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケット S
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：224ADBZX00042000 管理医療機器
 販売名：セルフライゲーションパッカルチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Clippy MicroMini Rhodium Coating Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング フォーミュラー-R (ロスタイプ) 下顎

ブラケット・マーキング色

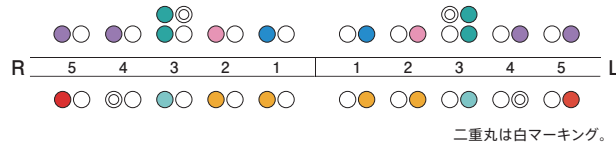

| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 1 2 | -1° | 2° | 0° | 2.6 | L R | 9521-111L 9521-111R | 9521-112L 9521-112R | |
| Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3 | -11° | 7° | 2°M | 2.6 | L | 9521-311L | 9521-312L | Post付き |
| | | | | | R | 9521-311R | 9521-312R | Post付き |
| Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小白歯 4 4 PASSIVE仕様 | -17° | -1° | 4°D | 2.6 | L | 9521-P411L | 9521-P412L | Post付き |
| | | | | | R | 9521-P411R | 9521-P412R | Post付き |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小白歯 5 5 PASSIVE仕様 | -22° | -1° | 4°D | 2.6 | L | 9521-P511L | 9521-P512L | Post付き |
| | | | | | R | 9521-P511R | 9521-P512R | Post付き |
| Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1 大白歯 6 6 | -25° | 0° | 4°D | 4.0 | L | (W)952-611L | (W)952-612L | 10個/ PK |
| | | | | | R | (W)952-611R | (W)952-612R | |

CLIPPY^{MicroMini} RC
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケット S
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：224ADBZX00042000 管理医療機器

販売名：セルフライゲーションバックルチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Clippy MicroMini Rhodium Coating Formula-M (Mclaughlin Type*) Maxillary Arch
クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング フォーミュラー-M (マクロフリンタイプ) 上顎

ブラケット全体にロジウムコーティングを施すことによって、
 メタルブラケットでありながら、高い審美性を実現しました。
 また、新たなロープロファイル仕様とコンパクトな形状は、
 装着後の違和感を軽減します。小白歯はすべてパッシブ仕様。
 スペックはマクロフリンタイプでご用意しております。




| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/ Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1 | 17° | 4° | 0° | 2.8 | L R | — — | 9571-102L 9571-102R | |
| Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2 | 10° | 8° | 0° | 2.6 | L R | — — | 9571-202L 9571-202R | |
| Upper Cuspids 上顎 犬歯 3 3 | -7° | 8° | 0° | 2.6 | L | — | 9571-302L | Post付き |
| | | | | | R | — | 9571-302R | Post付き |
| | | | | | L | — | 9571-306L | Post付き |
| | | | | | R | — | 9571-306R | Post付き |
| Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小白歯 4 4 PASSIVE仕様 | -7° | 0° | 0° | 2.6 | L | 9571-P401L | 9571-P402L | Post付き |
| | | | | | R | 9571-P401R | 9571-P402R | Post付き |
| | -7° | 0° | 0° | 2.6 | L&R | 9571-P4030 | 9571-P4040 | |
| Upper 2nd Bicuspids 上顎 第2小白歯 5 5 PASSIVE仕様 | -7° | 0° | 0° | 2.6 | L | 9571-P501L | 9571-P502L | Post付き |
| | | | | | R | 9571-P501R | 9571-P502R | Post付き |
| | -7° | 0° | 0° | 2.6 | L&R | 9571-P5030 | 9571-P5040 | |
| Upper 1st Molars CLIPPYTUBE 上顎 第1大白歯 6 6 | -14° | 0° | 10°D | 4.0 | L R | (W)957-607L (W)957-607R | (W)957-608L (W)957-608R | 10個/ PK |

10個/
PK

CLIPPY^{MicroMini} RC APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケット S
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：224ADBZX00042000 管理医療機器
 販売名：セルフライゲーションパッカルチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Clippy MicroMini Rhodium Coating Formula-M (Mclaughlin Type*) Mandibular Arch クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング フォーミュラー-M (マクローフリンタイプ) 下顎

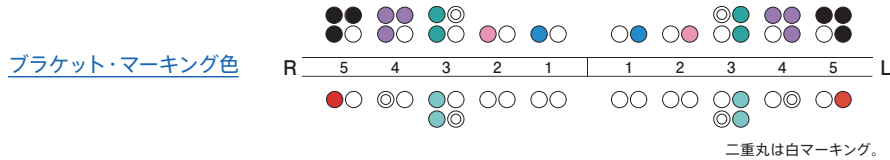

| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------------|------------|
| Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 1 2 | -6° | 0° | 0° | 2.6 | L&R | ———— | 9571-1120 | |
| Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3 | -6° | 3° | 0° | 2.6 | L | ———— | 9571-312L Post付き | 10個/ PK |
| | | | | | R | ———— | 9571-312R Post付き | |
| Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小臼歯 4 4 PASSIVE仕様 | -12° | 2° | 0° | 2.6 | L | 9571-P411L | 9571-P412L Post付き | |
| | | | | | R | 9571-P411R | 9571-P412R Post付き | |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小臼歯 5 5 PASSIVE仕様 | -12° | 2° | 0° | 2.6 | L | 9571-P413L | 9571-P414L | |
| | | | | | R | 9571-P413R | 9571-P414R | |
| Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1大臼歯 6 6 | -17° | 2° | 0° | 2.6 | L | 9571-P511L | 9571-P512L Post付き | |
| | | | | | R | 9571-P511R | 9571-P512R Post付き | |
| | -17° | 2° | 0° | 2.6 | L | 9571-P513L | 9571-P514L | |
| | | | | | R | 9571-P513R | 9571-P514R | |

*Note:
 ※It does not imply endorsement by doctor.
 ※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。

| | | | | | | | | |
|--|------|----|----|-----|---|-------------|-------------|------------|
| Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1大臼歯 6 6 | -20° | 0° | 0° | 4.0 | L | (W)957-611L | (W)957-612L | 10個/ PK |
| | | | | | R | (W)957-611R | (W)957-612R | |

mini CLIPPY
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：212008ZZ00319000 管理医療機器

販売名：セルフライゲーションバックルチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch

ミニクリッピー フォーミュラー R(ロスタイプ)上顎



ツインブラケットとセルフライゲーティング機能、そしてフルプログラム化されたプリアジャस्टッドアプライアンス。TOMYの最新テクノロジーがセルフライゲーティングブラケットにさらなる進化を与えました。スベックはDr. Rothのオリジナルでご用意しております。




| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|
| Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1 | 12° | 5° | 0° | 3.0 | L R | 952-101L 952-101R | 952-102L 952-102R | |
| Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2 | 8° | 9° | 0° | 2.8 | L R | 952-201L 952-201R | 952-202L 952-202R | |
| Upper Cuspids 上顎 犬歯 3 3 | -2° | 13° | 4°M | 3.0 | L | 952-301L | 952-302L | Post付き |
| | | | | | R | 952-301R | 952-302R | Post付き |
| | -2° | 13° | 4°M | 3.0 | L | 952-303L | 952-304L | |
| | | | | | R | 952-303R | 952-304R | |
| | -2° | 10° | 4°M | 3.0 | L | 952-305L | 952-306L | Post付き |
| | | | | | R | 952-305R | 952-306R | Post付き |
| -2° | 10° | 4°M | 3.0 | L | 952-307L | 952-308L | | |
| | | | | R | 952-307R | 952-308R | | |
| Upper 1st, 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小臼歯 5 4 5 | -7° | 0° | 2°D | 3.0 | L | 952-401L | 952-402L | Post付き |
| | | | | | R | 952-401R | 952-402R | Post付き |
| | -7° | 0° | 2°D | 3.0 | L | 952-403L | 952-404L | |
| | | | | | R | 952-403R | 952-404R | |
| Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6 6 | -10° | 0° | 14°D | 4.0 | L | (W)952-607L | (W)952-608L | 10個/ PK |
| | | | | | R | (W)952-607R | (W)952-608R | |

Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch

ミニクリッピー フォーミュラー R(ロスタイプ)下顎

ブラケット・マーキング色

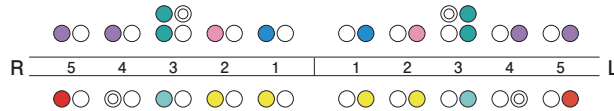

注1：二重丸は白マーキング。

| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|
| Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 1 2 | -1° | 2° | 0° | 2.6 | L | 952-111L | 952-112L | |
| | | | | | R | 952-111R | 952-112R | |
| Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3 | -11° | 7° | 2°M | 3.0 | L | 952-311L | 952-312L | Post付き |
| | | | | | R | 952-311R | 952-312R | Post付き |
| Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小臼歯 4 4 | -11° | 7° | 2°M | 3.0 | L | 952-313L | 952-314L | |
| | | | | | R | 952-313R | 952-314R | |
| Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小臼歯 4 4 | -17° | -1° | 4°D | 3.0 | L | 952-411L | 952-412L | Post付き |
| | | | | | R | 952-411R | 952-412R | Post付き |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小臼歯 5 5 | -17° | -1° | 4°D | 3.0 | L | 952-413L | 952-414L | 10個/ PK |
| | | | | | R | 952-413R | 952-414R | |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小臼歯 5 5 | -22° | -1° | 4°D | 3.0 | L | 952-511L | 952-512L | Post付き |
| | | | | | R | 952-511R | 952-512R | Post付き |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小臼歯 5 5 | -22° | -1° | 4°D | 3.0 | L | 952-513L | 952-514L | |
| | | | | | R | 952-513R | 952-514R | |
| Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1大臼歯 6 6 | -25° | 0° | 4°D | 4.0 | L | (W)952-611L | (W)952-612L | 10個/ PK |
| | | | | | R | (W)952-611R | (W)952-612R | |

mini CLIPPY
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21200BZZ00319000 管理医療機器

販売名：セルフライゲーションパッカルチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Formula-M (McLaughlin Type*) Maxillary Arch

ミニクリッピー フォーミュラー M(マクローフリンタイプ*)上顎



ツインブラケットとセルフライゲーティング機能、そしてフルプログラム化されたプリアジャステッドアプライアンス。TOMYの最新テクノロジーがセルフライゲーティングブラケットにさらなる進化を与えました。スペックはDr. McLaughlinのオリジナルでご用意しております。




| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018" Slot | .022" Slot | Quantity | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|
| Upper Centrals 上顎 中切歯 1 1 | 17° | 4° | 0° | 3.0 | L R | 957-101L 957-101R | 957-102L 957-102R | 10個/ PK | |
| Upper Laterals 上顎 側切歯 2 2 | 10° | 8° | 0° | 2.8 | L R | 957-201L 957-201R | 957-202L 957-202R | | |
| Upper Cuspids 上顎 犬歯 3 3 | -7° | 8° | 0° | 3.0 | L | 957-301L | 957-302L | | Post付き |
| | | | | | R | 957-301R | 957-302R | | Post付き |
| | -7° | 8° | 0° | 3.0 | L | 957-303L | 957-304L | | |
| | | | | | R | 957-303R | 957-304R | | |
| | 0° | 8° | 0° | 3.0 | L | 957-305L | 957-306L | | Post付き |
| | | | | | R | 957-305R | 957-306R | | Post付き |
| Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小臼歯 4 4 | -7° | 0° | 0° | 3.0 | L R L&R | 957-401L 957-401R 957-4030 | 957-402L 957-402R 957-4040 | | Post付き Post付き |
| Upper 2nd Bicuspids 上顎 第2小臼歯 5 5 | -7° | 0° | 0° | 3.0 | L R L&R | 957-501L 957-501R 957-5030 | 957-502L 957-502R 957-5040 | | Post付き Post付き |
| Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6 6 | -14° | 0° | 10°D | 4.0 | L R | (W)957-607L (W)957-607R | (W)957-608L (W)957-608R | 10個/ PK | |

mini **CLIPPY**
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：21200BZZ00319000 管理医療機器
 販売名：セルフライゲーションバックルチューブ
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

Formula-M (McLaughlin Type*) Mandibular Arch
 ミニクリッピー フォーミュラー M(マクロフリントタイプ*)下顎

ブラケット・マーキング色

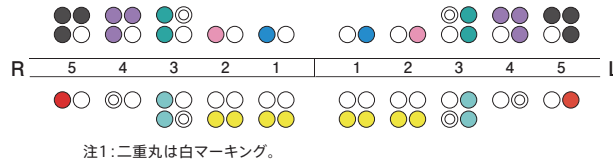

| | Torque, Degrees | Angu., Degrees | Offset, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018"Slot | .022"Slot | Quantity | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| Lower Anteriors 下顎 前歯 2 1 2 | -6° | 0° | 0° | 2.6 | L&R | 957-1110 | 957-1120 | 10個/ PK | | | |
| | 0° | 0° | 0° | 2.6 | L&R | 957-1130 | 957-1140 | | | | |
| | -6° | 3° | 0° | 3.0 | L | 957-311L | 957-312L | | Post付き | | |
| | | | | | R | 957-311R | 957-312R | | Post付き | | |
| Lower Cuspids 下顎 犬歯 3 3 | -6° | 3° | 0° | 3.0 | L | 957-313L | 957-314L | | 10個/ PK | | |
| | | | | | R | 957-313R | 957-314R | | | | |
| | 0° | 3° | 0° | 3.0 | L | 957-315L | 957-316L | | | Post付き | |
| | | | | | R | 957-315R | 957-316R | | | Post付き | |
| Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小臼歯 4 4 | -12° | 2° | 0° | 3.0 | L | 957-411L | 957-412L | | | Post付き | |
| | | | | | R | 957-411R | 957-412R | | | Post付き | |
| | -12° | 2° | 0° | 3.0 | L | 957-413L | 957-414L | | | 10個/ PK | |
| | | | | | R | 957-413R | 957-414R | | | | |
| Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小臼歯 5 5 | -17° | 2° | 0° | 3.0 | L | 957-511L | 957-512L | | | | Post付き |
| | | | | | R | 957-511R | 957-512R | | | | Post付き |
| | -17° | 2° | 0° | 3.0 | L | 957-513L | 957-514L | 10個/ PK | | | |
| | | | | | R | 957-513R | 957-514R | | | | |

*Note:
 ※It does not imply endorsement by doctor.
 ※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。

| | | | | | | | | |
|--|------|----|----|-----|---|-------------|-------------|------------|
| Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1大臼歯 6 6 | -20° | 0° | 0° | 4.0 | L | (W)957-611L | (W)957-612L | 10個/ PK |
| | | | | | R | (W)957-611R | (W)957-612R | |

CLIPPY L
APPLIANCES

Lingual Self-Ligating Brackets

クリッピー L 舌側用 セルフライゲージング ブラケット

CLIPPY Lの特長

ロープロファイル

ブラケットの厚みが非常に薄く、装着後の違和感を軽減します。



With Hook

5～5までのブラケットは、フック付の有無を選択できます。舌感を考慮した幅広フック、深い懐は操作性を向上させます。3～3はダイレクトボンディングにも便利なポジショニング用センターラインを付与しました。



With Lingual Sheath

パラタルアーチバーが装着可能なリンガルシース付もラインナップ。シース部も違和感を軽減させる、ハイトを低く抑えた設計。中央部には食物残渣の除去を容易にするために、穴を設けました。



セルフライゲージング

独自のクリップ構造は、開閉が簡単で、リンガルでの面倒な結紮を必要としません。煩わしさを解消します。

ボンディングベース

舌側形態に合わせた形状のボンディングベースを採用しました。リンガルフォッサの深いところに接着可能です。



CLIPPY L 2Gの特長

探針での開閉が可能な

オープニングホールを付与

クリップの開けすぎを防止する

ストッパー機能を追加

歯肉へのクリアランスを考慮した
フック形状




結紮を重視した
ウイング形状

Lingual Self-Ligating Brackets


クリッピー L 舌側用 セルフライゲータリング ブラケット

クリップの開閉方法

OPEN

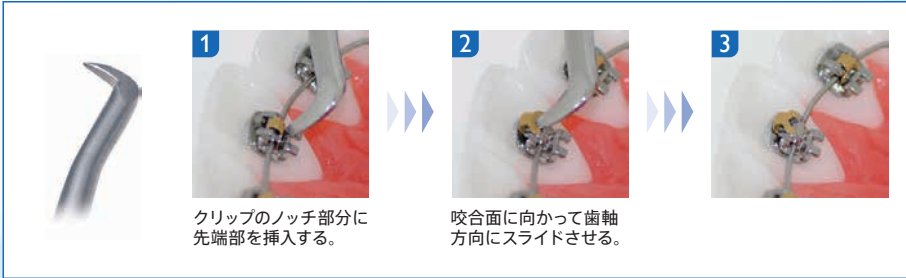

CLOSE

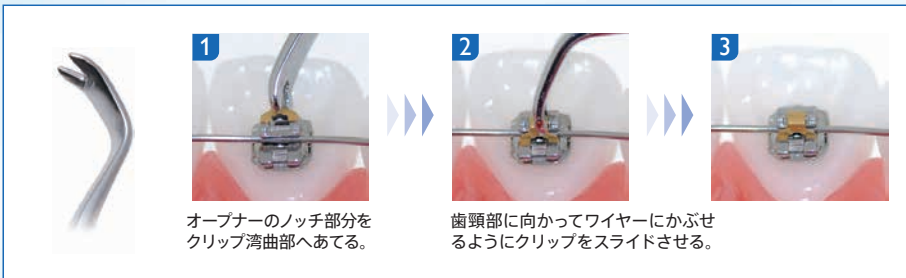

専用オープニングツール




813-1090

クリッピーL オープナー

販売名：クリッピーL オープナー
 一般的名称：歯科矯正用結さつ器
 届出番号：11B3X00012000061 一般医療機器

クリップクロージングアシストツール

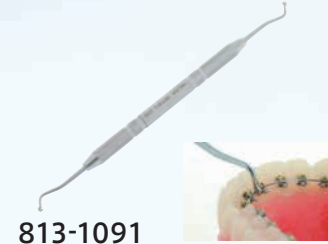

813-1091

キーズ トーカー

販売名：キーズ トーカー
 一般的名称：歯科矯正用結さつ器
 届出番号：11B3X00012000062 一般医療機器

SELF-LIGATING BRACKET SYSTEM















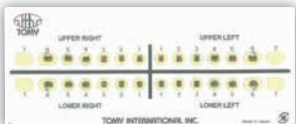
CLIPPY L
APPLIANCES販売名: リンガルブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
認証番号: 218ADBZX00054000 管理医療機器

Lingual Self-Ligating Brackets

クリッピー L 舌側用 セルフライゲータリング ブラケット

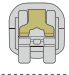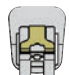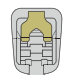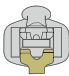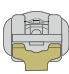

セルフライゲータリングシステムを採用。独自のクリップ構造は、開閉が簡単でリンガルでの面倒な結紮を必要としません。また、ロープロファイルを実現。ブラケットの厚みが非常に薄く、装着後の違和感を軽減します。

| | Torque, Degrees | Span, mm | Left/Right | .018" Slot | Quantity |
|---|--|----------|------------|------------|---|
| Up. Centrals & Laterals & Cuspids 上顎 中切歯 & 側切歯 & 犬歯 3 2 1 1 2 3 |  3 | 60° | 2.2 | L&R | 991-11H Hook付き |
| |  1C | | | L&R | 991-11 |
| |  1 | 60° | 2.2 | L&R | 992-11 ラージベース |
| Lo. Anteriors & Cuspids 下顎 前歯 & 犬歯 3 2 1 1 2 3 |  3 | 50° | 2.2 | L&R | 991-51H Hook付き |
| |  1C | | | L&R | 991-51 |
| |  1 | 50° | 2.2 | L&R | 992-51 ラージベース |
| Lo. Anteriors 下顎 前歯 2 1 1 2 |  1 | 50° | 1.6/2.0 | L&R | 991-57 ナロータイプ |
| Up. & Lo. 1st, 2nd Bicuspids 上・下顎 第1、2小臼歯 5 4 4 5 5 4 4 5 |  5 | 10° | 2.2 | L&R | 991-47H Hook付き |
| |  5 | | | L&R | 991-45 |
| Upper Molars 上顎 大白歯 7 6 6 7 |  6 | 10° | 3.8 | L | 991-607L Hook付き |
| |  6 | | | R | 991-607R Hook付き |
| 上顎 大白歯 WELD用 シース付 6 6 |  6 | 10° | 3.8 | L&R | WV991-6050 WELD用 シース付き |
| Lower Molars 下顎 大白歯 7 6 6 7 |  6 | 0° | 3.8 | L | 991-611L Hook付き |
| |  6 | | | R | 991-611R Hook付き |
| One Patient Kit 1症例キット 6 ~ 6 6 ~ 6 |  | | | L&R | 991-0021 |
| | | | | L&R | 991-0021H Hook付き |

5個/
PK24個/
KIT

CLIPPY L 2G APPLIANCES

販売名：リンガルブラケット
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント
 認証番号：218ADBZX00054000 管理医療機器


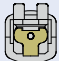
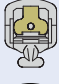
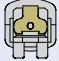
Lingual Self-Ligating Brackets

クリッピー L 2G 舌側用 セルフライゲーティング ブラケット

CLIPPY L 2G



結紮がしやすいウィング形状と、クリップのオープニングホールや
 ストッパーなど、開閉をアシストする新機能が特徴的です。

| | | Torque, Degrees | Span, mm | Left/ Right | .018" Slot | Quantity |
|--|--|--------------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------|
| Up. Centrals & Laterals & Cuspids 上顎 中切歯 & 側切歯 & 犬歯 <u>3 2 1 1 2 3</u> |  3B | 60° | 2.2 | L&R | 9910-11H Hook付き | 5個/ PK |
| |  1B | | | L&R | 9910-11 | |
| Lo. Anteriors & Cuspids 下顎 前歯 & 犬歯 <u>3 2 1 1 2 3</u> |  3B | 50° | 2.2 | L&R | 9910-51H Hook付き | |
| |  1B | | | L&R | 9910-51 | |